




Procedura del Test

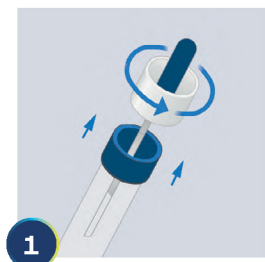


1
Ruotare il cappuccio bianco in senso antiorario ed estrarre la palettina per le feci.

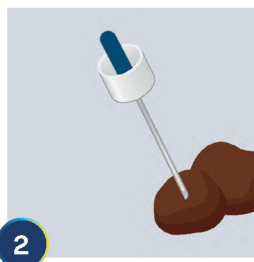

2
Inserisci l'estremità della paletta nel campione di feci in tre punti diversi. Evitare granelli, fibre e bolle d'aria. Assicurarsi che entrambe le scanalature all'estremità della paletta siano coperte.

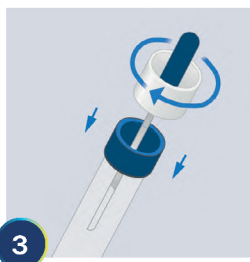


3
Reinserire la paletta nell'estremità blu della provetta e ruotare in senso orario fino a bloccaggio. Le feci in eccesso vengono rimosse.

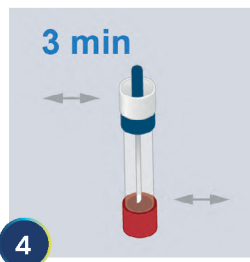

4
Assicurarsi che il tubo sia completamente chiuso, quindi agitare per 3 minuti.



5
Aprire la busta di alluminio e verificare che la cassetta per il test rapido o la finestra di test non siano danneggiate.

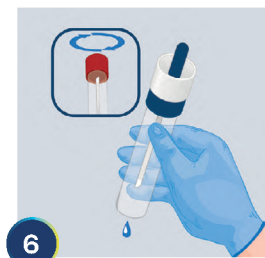



6
Togliere il tappo rosso e scartare la prima goccia premendo delicatamente sui lati.



7
Asciugare la punta del dispositivo con della carta per assicurarsi che sia asciutta.




8
Tenere il dispositivo di estrazione in posizione verticale, ad un angolo di 90 gradi, sopra il device del test rapido e versare due gocce nel pozzetto premendo delicatamente i lati. Il liquido dovrebbe fuoriuscire nella finestrella nella sample port del device. Se dopo 30 secondi ciò non accade, aggiungere un'altra goccia nel pozzetto.

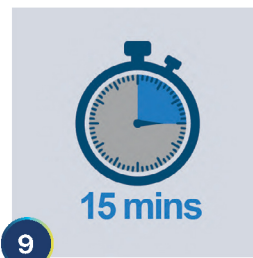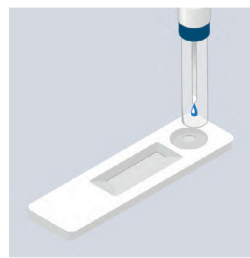


9
Lasciare a temperatura ambiente per 15 minuti. (Non leggere il risultato dopo 30 minuti).


Interpretazione dei risultati

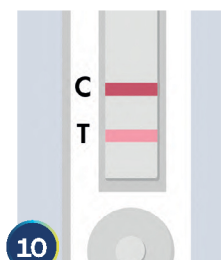

10
I risultati del test sono ora pronti per l'interpretazione.
C = linea di controllo
T = linea di test

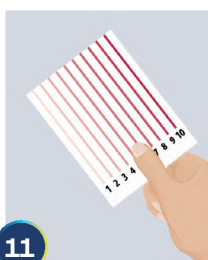

11
Prendere la scala colorimetrica di riferimento.

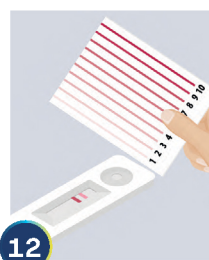

12
Utilizzando la scala colorimetrica, confrontare l'intensità del colore della linea di test con la scala per ottenere un punteggio.

Utilizzando la scheda di valutazione, quantificare la concentrazione di calprotectina nelle feci:

Risultati nel cane			Risultati nel gatto		
Lettura visiva scala di valutazione	mg/kg	Interpretazione	Lettura visiva scala di valutazione	mg/kg	Interpretazione
<1	<2.0	Normale	<1	<2.0	Normale
1	2.0	Normale	1	2.0	Borderline
2	2.5	Borderline	2	2.5	Malattia con gravità crescente
3	3.0	Malattia con gravità crescente	3	3.0	
4	3.75		4	3.75	
5	4.5		5	4.5	
6	5.6		6	5.6	
7	6.0		7	6.0	
8	6.5	↓	8	6.5	↓
9	12.8		9	12.8	
10	>16		10	>16	